

Подготовка пациента для сбора ротовой жидкости:

- за час не курить и не чистить зубы;
- исключить прием пищи в течение 4-х часов;
- за десять минут прополоскать ротовую полость теплым физиологическим раствором или водой.

Получение материала - ротовая жидкость.

Нестимулированная ротовая жидкость собирается в течение 5-10 минут в положении стоя или сидя. Пациент губами удерживает пластиковую трубочку, по которой биологический материал поступает в пробирку типа Эпиндорф объемом 1,5-2 мл. После получения ротовой жидкости, перед транспортировкой, необходимо промаркировать пробирку в соответствии с номером бланка.

Хранение допускается при температуре от +4°C до -20°C, но не более 3 часов. Длительное сохранение возможно при однократном замораживании от – 20°C до – 70°C в течении 3-4 месяцев.